


Septalkan®

MODO DE USO

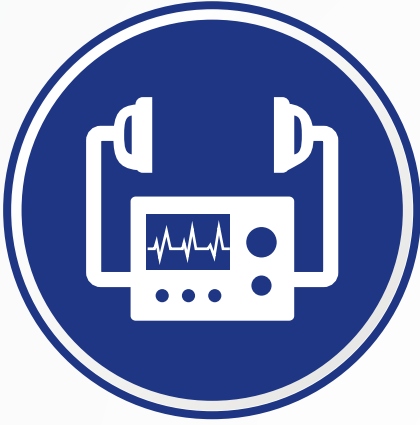

1.

Asegúrese de que la zona a limpiar y desinfectar se encuentre libre de sobreacumulación de polvo o materia orgánica.



2.

Aplice **Septalkan®** directamente sobre toda la zona que desea limpiar y desinfectar.




3.

Distribuya uniformemente con un paño no tejido respetando la técnica de limpieza y deje secar.



4.

Deje actuar el producto sobre la zona donde fue aplicado durante 5 minutos.

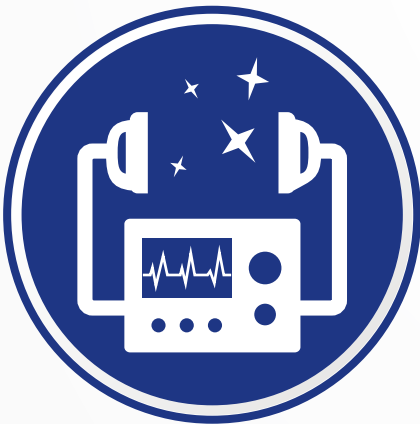

5.

No enjuague ni retire el producto. La zona estará libre de microorganismos patógenos (bacterias, virus, hongos y esporas).

- **Septalkan®**, detergente desinfectante listo para usar por aspersion en spray.
- Aplíquelo directamente sobre la zona a limpiar y desinfectar.
- Asegúrese de que ésta se encuentre libre de sobreacumulación de polvo o materia orgánica.
- Utilice paños o toallas no tejidas al aplicarlo y distribuirlo.